


SPOK₂₁

Reset der Geräteeinstellungen

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die SW-Version ab: V2.0r03

Die verschiedenen Geräteeinstellungen (zu erreichen über  + Enter) werden in einem besonderen Bauteil gespeichert. Um diese in den ursprünglichen Zustand zu bringen kann wie folgt vorgegangen werden:

1. Das Gerät ausschalten
2. Die 3 folgenden Speicher-Tasten gleichzeitig betätigen (siehe Bild am Ende)
linke Seite: obere und untere Taste
rechte Seite: mittlere Taste.
Das Gerät wird dadurch eingeschaltet.
3. Die Tasten loslassen, wenn Texte auf dem Display erscheinen.

Falls die Software abgestürzt ist und SPOK nicht mit den dafür vorgesehenen Tasten ausgeschaltet werden kann, ist so vorzugehen:

1. Das Gerät am Batterieschalter (Unterseite) ausschalten
2. Die 3 folgenden Speicher-Tasten gleichzeitig betätigen (siehe Bild am Ende)
linke Seite: obere und untere Taste
rechte Seite: mittlere Taste
3. Die Tasten gedrückt halten **und** den Stecker des Ladegerätes einstecken
4. Die Tasten loslassen, wenn Texte auf dem Display erscheinen.

Auswahl:

Es werden 3 Möglichkeiten durch die 3 Tasten links vom Display dargestellt:

Reset settings	→	Die Geräteeinstellungen werden zurückgesetzt (nicht die vom ScanningModul)
Reset user texts	→	Vom Benutzer eingegebene Texte im Speicher löschen bzw.durch die Default-Texte ersetzen
Start normal	→	Normaler Gerätestart



SPOK21